



## Selbsttests an unserer Schule



1) Die vorbereitete Teststation.

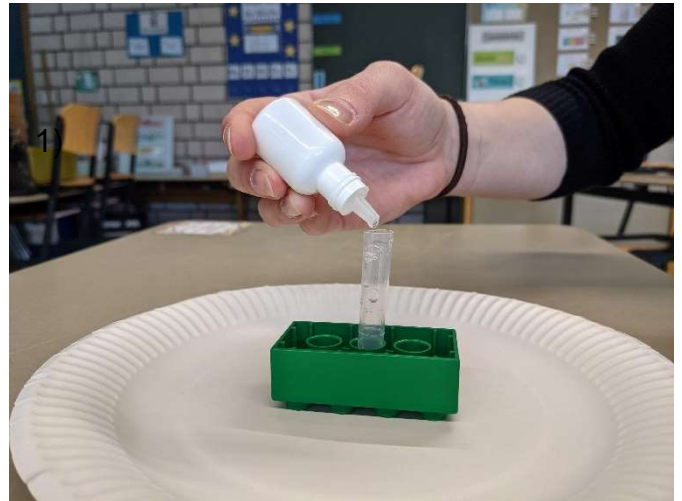


2) 10 Tropfen aus dem Fläschchen in das Röhrcchen geben.

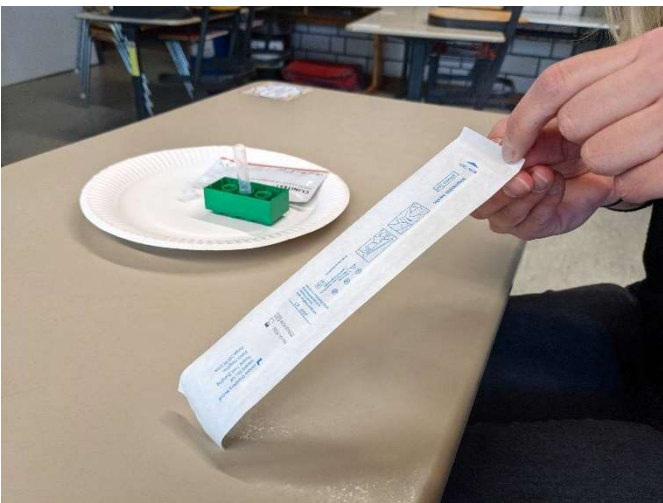

3) Das Stäbchen auspacken, ohne die Wattespitze zu berühren.



4) Das Stäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch schieben, dabei jeweils 5-mal langsam gegen die Innenseite des Nasenlochs rollen.

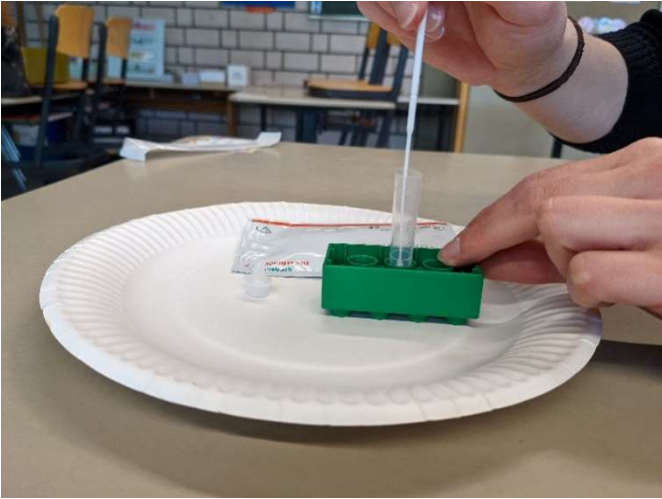

5) Stäbchen in das Röhrchen geben und in der Flüssigkeit rollen. Dabei die Spitze gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens drücken.




6) Röhrchen mit Stäbchen in die Halterung stellen und 1 Minute warten.



7) Das Röhrchen von außen zusammendrücken, um möglichst viel Flüssigkeit aus der Spitze zu lösen.



8) Stäbchen entsorgen.

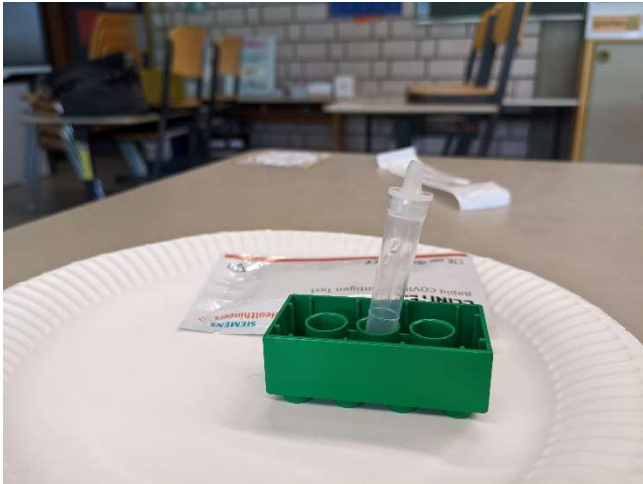

9) Kappe auf das Röhrcchen stecken und Testkassette auspacken.



10) 4 Tropfen in die runde Vertiefung der Testkassette geben.



11) Nach 15 Minuten kann das Testergebnis abgelesen werden:  
C = negativ -> 😊  
C + T = positiv -> Eltern werden informiert  
T = Test ungültig -> Wiederholung  
keine  
Linie = Test ungültig -> Wiederholung



12) Verbrauchtes Material entsorgen.